


CytoSorb®



Передовой опыт Блок-схема при рабдомиолизе

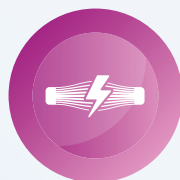

Терапевтическая цель

- Поддержка восстановления функции почек за счет:
 - быстрого снижения повышенного уровня миоглобина;
 - ослабления гипервоспаления.



Выбор пациентов

- Тяжелый рабдомиолиз с уровнем креатинкиназы (КК) > 5000 Ед/л
- Новое нарушение функции почек (например, уровень гломерулярной фильтрации (УГФ) < 40 ml/min) AND myoglobin > 10 000 мкг/л (при наличии)
- При уровне миоглобина > 30 000 мкг/л начало применения CytoSorb® может рассматриваться независимо от функции почек




Продолжительность

- В идеале начать в течение первых 24 часов после диагностирования / начала тяжелого рабдомиолиза
- Как правило, начинать нужно как можно раньше, пока не наступили необратимые повреждения



Дозирование

- Если требуется постоянное снижение уровня миоглобина, заменяйте адсорбер уже через 8 часов.
- Продолжайте терапию до достижения достаточной стабилизации или снижения уровня миоглобина значительно ниже 5000 мкг/л (КК < 1000 Ед/л)

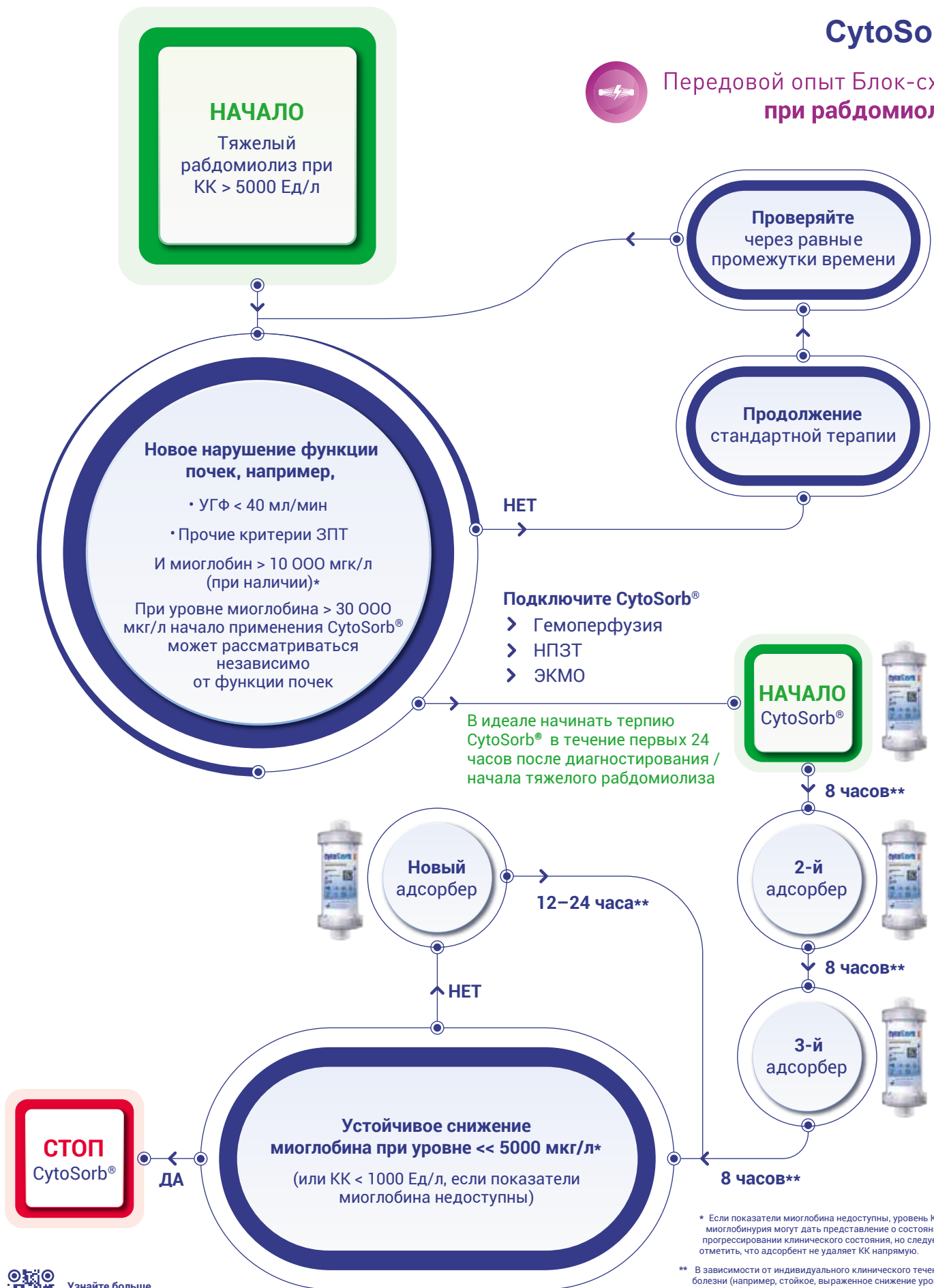

* Если показатели миоглобина недоступны, уровень КК или миоглобурия могут дать представление о состоянии или прогрессировании клинического состояния, но следует отметить, что адсорбент не удаляет КК напрямую.

** В зависимости от индивидуального клинического течения болезни (например, стойкое, выраженное снижение уровней миоглобина) возможно отклонение от указанной продолжительности в сторону увеличения интервалов или даже досрочное прекращение терапии. Необходимым условием успеха терапии является надлежащий контроль основной причины.



Узнайте больше
cyto.zone/setup