

# CytoSorb®



## Передовой опыт Блок-схема удаление антитромботических препаратов



xxx

Терапевтическая цель



Выбор пациентов

Пациенты, находящиеся на кардиохирургической операции, получавшие предварительную терапию тикагрелором и (или) ривароксомабаном, с последней дозой

- тикагрелора менее чем за 72 часа;
- ривароксомабана менее чем за 48 часов.



Продолжительность

Начало терапии с началом СЛШ. CytoSorb легко подключается к контуру СЛШ (после насоса в венозный резервуар).




Дозирование

Послеоперационное продолжение (с новым адсорбером, подключенным к экстракорпоральному контуру) обычно не требуется, если время СЛШ > 60 мин, но может быть выполнено при необходимости.



Передовой опыт Блок-схема  
удаление анти тромботических  
препаратов

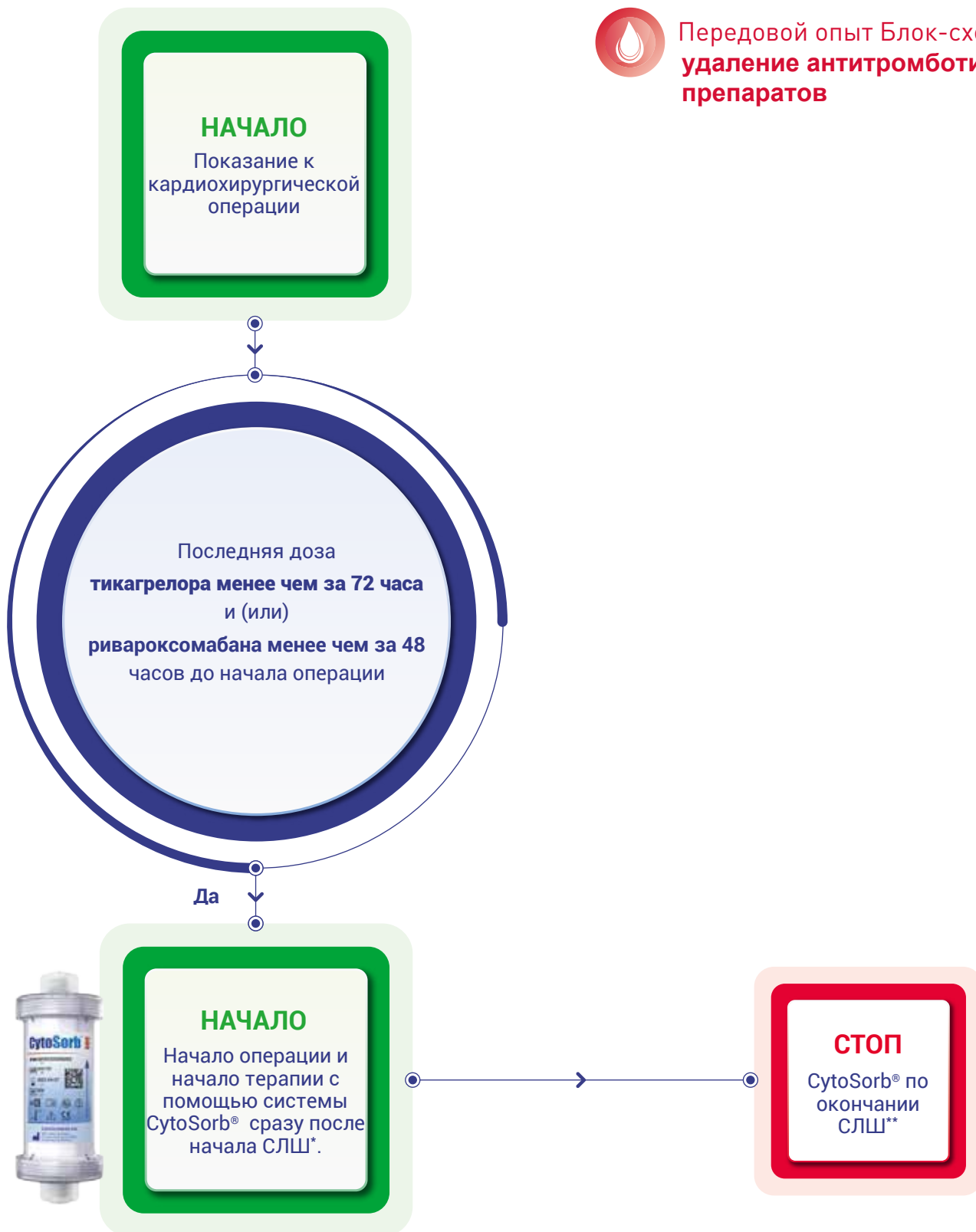

\* CytoSorb® integration into CPB

\*\* CPB times should ideally be >60 minutes to allow enough time for sufficient substance removal by CytoSorb®.



Learn more in detail  
[cyto.zone/setup](http://cyto.zone/setup)